

Una solución completa para la desinfección de alto nivel de dispositivos médicos invasivos sin iluminación.

 Consulte la Guía del usuario para obtener instrucciones completas.

Notas:

- Siga siempre los protocolos hospitalarios y las instrucciones de los fabricantes de los dispositivos.
- Desinfectese las manos y utilice el EPP adecuado cuando manipule desinfectantes y productos sanitarios.
- Se debe realizar una limpieza inicial previa inmediatamente después del uso del dispositivo médico según el protocolo del hospital.
- Tenga cuidado de no frotar ni doblar el instrumento y preste especial atención a los bordes, crestas, hendiduras y zonas donde se conectan diferentes materiales.
- Prepárese para el proceso de descontaminación sacando de la caja una de cada toallita y la espuma activadora.
- La sonda puede colgarse para facilitar el procedimiento de descontaminación.
- No utilizar pasada la fecha de caducidad. Consulte la fecha de caducidad y el número de lote en la superficie de la caja.
- No utilizar si la bolsita de la toallita está dañada, o si la toallita está descolorida, dañada o seca.
- Utilice más toallitas si es necesario para asegurarse de que el instrumento está visiblemente limpio.
- Conserve las toallitas para completar el libro de trazabilidad de Tristel al final del procedimiento de descontaminación.
- Deseche las toallitas y los guantes usados de acuerdo con la normativa local.
- Sólo para uso profesional

PASO 1 : LIMPIEZA



Saque la toallita Pre-Clean Wipe de su bolsa y despliéguela en la palma de la mano.

Limpie el dispositivo para eliminar toda la suciedad visible.

Deseche la toallita y los guantes usados de acuerdo con locales.

Desinfectese las manos y póngase guantes nuevos.

PASO 2a + 2b : ACTIVACIÓN



Saque la toallita esporicida Sporidical Wipe de su bolsa y despliéguela en la palma de la mano.


Tome el frasco de espuma Activator Foam y aplique dos dosis de espuma sobre la toallita esporicida.

Doble la Toallita esporicida Sporidical Wipe sobre sí misma y estrújela **15 segundos** para generar dióxido de cloro.

Asegúrese de que la toallita está completamente cubierta de espuma.

Utilice la toallita activada inmediatamente.

PASO 3 : DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL

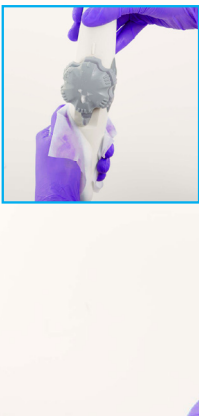


Limpie la superficie del dispositivo con un solo movimiento para cubrirlo con espuma, asegurándose de que todas las zonas entren en contacto con la toallita.

Deseche el paño usado de acuerdo con la normativa local.

Respete un tiempo de contacto de **30 segundos**.

PASO 4 : ENJUAGUE

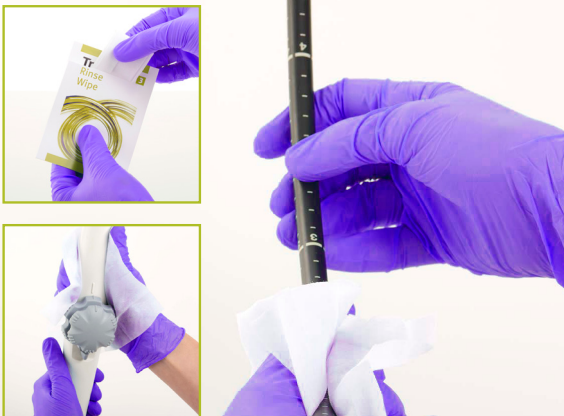

Saque la toallita Rinse Wipe de su bolsa y despliéguela en la palma de la mano.

Limpie el dispositivo para eliminar el exceso de espuma.

Deseche la toallita usada de acuerdo con la normativa local.

STEP 4 : TRACEABILITY



Consulte los bolsas utilizadas y la botella de la espuma activadora para completar el Libro de registro de trazabilidad de Tristel.