

Una solución completa para la desinfección de alto nivel de dispositivos médicos invasivos sin iluminación.

 Consulte la Guía del usuario para obtener instrucciones completas.

Notas:

- Siga siempre los protocolos hospitalarios y las instrucciones de los fabricantes de los dispositivos.
- Desinfectese las manos y utilice el EPP adecuado cuando manipule desinfectantes y productos sanitarios.
- Se debe realizar una limpieza inicial previa inmediatamente después del uso del dispositivo médico según el protocolo del hospital.
- Tenga cuidado de no frotar ni doblar el instrumento y preste especial atención a los bordes, crestas, hendiduras y zonas donde se conectan diferentes materiales.
- Prepárese para el proceso de descontaminación sacando de la caja una de cada toallita y la espuma activadora.
- No utilizar pasada la fecha de caducidad. Consulte la fecha de caducidad y el número de lote en la superficie de la caja.
- No utilizar si la bolsa de la toallita está dañada o si la toallita está decolorida, dañada o seca.
- Utilice más toallitas si es necesario para garantizar que el instrumento esté visiblemente limpio.
- Conserve las toallitas para completar el libro de trazabilidad de Tristel al final del procedimiento de descontaminación.
- Deseche las toallitas y los guantes usados de acuerdo con la normativa local.
- Sólo para uso profesional

PARA CATÉTERES DE
MANOMETRÍA GASTROINTESTINAL

PASO 1 : LIMPIEZA



Saque la toallita Pre-Clean Wipe de su bolsa y despléguela en la palma de la mano.

Limpie la sonda para para eliminar toda la suciedad visible.

Deseche la toallita y los guantes usados de acuerdo con locales.

Desinfectese las manos y póngase guantes nuevos.

PASO 2a + 2b : ACTIVACIÓN



Saque la toallita esporicida Sporcidal Wipe de su bolsa y despléguela en la palma de la mano.

Tome el frasco de espuma Activator Foam y aplique dos dosis de espuma sobre la toallita Sporcidal Wipe.

Doble la toallita esporicida Sporcidal Wipe sobre sí misma y estrújela **15 segundos** para generar para generar dióxido de cloro.

Asegúrese de que la toallita completamente cubierta de espuma.

Utilice la toallita activada inmediatamente.

PASO 2 : DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL



Limpie la superficie del catéter con un solo movimiento para cubrirlo de espuma asegurándose de que todas las zonas contacto con la toallita.

Deseche la toallita usada de acuerdo con la normativa local.

Respete un tiempo de contacto de **30 segundos**.

PASO 3 : ENJUAGUE



Saque la toallita Rinse Wipe de su bolsa y despléguela en la palma de la mano.

Limpie la sonda para el exceso de espuma.

Deseche la toallita usada de acuerdo con la normativa local.

PASO 4 : TRAZABILIDAD



Consulte las bolsas utilizadas y la botella de espuma activadora para completar el libro de registro de trazabilidad de Tristel.