



PRÊT À UTILISER LE DÉTERGENT- DÉSINFECTANT JET? C'EST PARTI.

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION

Quelques rappels importants avant de commencer :

- ✓ Lisez toujours l'étiquette et les informations relatives au produit avant utilisation.
- ✓ Portez l'équipement de protection individuelle approprié (EPI).
- ✓ Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
- ✓ **JET** est réservé à l'usage des professionnels de santé.
- ✓ Ne pas appliquer sur des surfaces en laiton, en cuivre, en aluminium, en acier doux ou en argent.

MODE D'EMPLOI



Pour assembler **JET**, prenez le pulvérisateur, dévissez les bouchons des flacons, puis, en suivant les repères **A rouge** et **B bleu** indiqués sur l'étiquette du flacon, insérez les tubes dans les goulots des flacons correspondants.



Serrez les loquets dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de chaque côté du pulvérisateur pour le sécuriser. Assurez-vous que l'embout est aligné avec la ligne supérieure sur la tête du pulvérisateur. **JET** est désormais prêt à l'emploi.




Appliquez au moins 2 doses sur une lingette.



Essuyez la surface.



Veillez à ce que la surface reste humide pendant une minute de temps de contact. Laissez sécher à l'air libre.

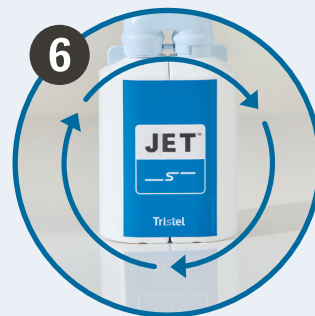

Si vous ne pouvez pas recycler, réutilisez ! Consultez la rubrique « IMPORTANT » ci-dessous pour en savoir plus.

IMPORTANT

Votre pulvérisateur **JET** doit être réutilisée avec le deuxième flacon **JET**. Pour ce faire, desserrez les loquets dans le sens des aiguilles d'une montre afin de retirer le pulvérisateur. Avant de suivre les instructions de montage ci-dessus, rincez les tubes à l'eau du robinet et séchez-les avec un essuie-tout.

Après utilisation, les flacons et bouchons **JET** vides peuvent être rincés à l'eau du robinet et recyclés.

CONDITIONS DE CONSERVATION

JET peut être conservé pendant 2 ans avant d'être utilisé et doit être stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, à une température comprise entre 10 °C et 35 °C.

 Pour obtenir des instructions détaillées, consultez le guide utilisateur.

Tristel™

France,
Tristel SaS, 130,
Boulevard de la Liberté, 59000 Lille
T +33 (0)3 66 88 01 84 E france@tristel.com
W www.tristel.com/fr-fr/

Belgique et GD de Luxembourg,
Tristel SA, Smalldallaan 14 B, 2660 Anvers
T +32 (0)3 889 26 40 E belgium@tristel.com
W www.tristel.com/be-fr/

Copyright © Tristel Solutions Limited
CCH-JET-168d-1
13/MAY/2026