

NOTES

- Ne pas utiliser si le flacon est endommagé.
- Désinfectez-vous les mains et portez des gants adaptés ainsi qu'un équipement de protection individuelle (EPI) lors de la manipulation de nettoyants, de désinfectants et de dispositifs médicaux. Les recommandations relatives au port de l'EPI peuvent varier selon l'établissement. Veuillez suivre les consignes locales.
- Lorsque vous utilisez Tristel DUO ULT ou Tristel CLEAN pour la première fois, appuyez deux à quatre fois sur la pompe pour l'amorcer.
- Ne pas utiliser sur des métaux tendres ou des aciers inoxydables de qualité inférieure.
- Des cotons-tiges peuvent être utilisés pour appliquer Tristel DUO ULT et Tristel CLEAN dans les zones difficiles d'accès, telles que les rainures ou les creux.
- Ce poster doit être utilisé conjointement avec la notice d'utilisation (IFU), l'étiquette du produit, la fiche de données de sécurité (FDS) et les instructions du fabricant du dispositif.
- Réservé à l'usage des professionnels de santé.

MODE D'EMPLOI



Appliquez Tristel CLEAN sur une lingette sèche.


Remarque : Les lingettes DUO WIPES sont recommandées.



Utilisez suffisamment de mousse pour recouvrir toute la surface du dispositif et essuyez **jusqu'à ce qu'il soit visiblement propre**. Portez une attention particulière aux bords, aux arêtes, aux rainures et aux jonctions entre différents matériaux. Utilisez davantage de mousse et de lingettes si nécessaire.



Placez le dispositif sur le **porte-sonde** pendant que vous vous préparez pour l'étape suivante.

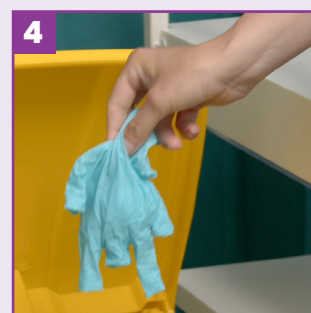

Remarque : Jetez la lingette et les gants usagés conformément aux règles locales. Ne les réutilisez pas.



Remarque : Lavez-vous les mains et enfilez des gants neufs.



Déposez **deux doses** de Tristel DUO ULT sur une lingette sèche.

Remarque : Les lingettes DUO WIPES sont recommandées.



Utilisez la lingette pour étaler la mousse sur la surface du dispositif et assurez-vous que toutes les zones sont bien recouvertes. Si nécessaire, utilisez un coton-tige pour faire pénétrer la mousse dans les rainures.

Remarque : Jetez la lingette usagée conformément aux règles locales. Ne pas réutiliser.



Veillez à ce que le dispositif reste humide pendant au moins **30 secondes de temps de contact**. Laissez sécher à l'air libre.

Remarque : Conservez le dispositif médical conformément aux protocoles hospitaliers afin d'éviter tout dommage ou toute recontamination.