

NOTES

- Ne pas utiliser Tristel CLEAN ou Tristel DUO ULT si l'un des flacons est endommagé ou a été ouvert accidentellement.
- Désinfectez-vous les mains et portez des gants ainsi qu'un équipement de protection individuelle (EPI) lors de la manipulation de nettoyeurs, de désinfectants et de dispositifs médicaux. Les recommandations relatives au port de l'EPI peuvent varier selon l'établissement. Veuillez suivre les consignes locales.
- Lorsque vous utilisez Tristel DUO ULT ou Tristel CLEAN pour la première fois, appuyez deux à quatre fois sur la pompe pour l'amorcer.
- Ne pas utiliser sur des métaux tendres ou des aciers inoxydables de qualité inférieure.
- Des cotons-tiges peuvent être utilisés pour appliquer Tristel CLEAN et Tristel DUO ULT dans les zones difficiles d'accès telles que les rainures ou les creux.
- Fermez le bouchon des lingettes Tristel DRY WIPES après chaque utilisation, ne remplissez pas le distributeur de lingettes et ne l'utilisez pas à d'autres fins.
- Réservé à l'usage des professionnels de santé.
- Ce poster doit être utilisé conjointement avec la notice d'utilisation (IFU), l'étiquette du produit, la fiche de données de sécurité (FDS) et les instructions du fabricant du dispositif.


MODE D'EMPLOI



Lavez-vous les mains et enfilez des gants propres, puis déposez au moins **deux doses** de Tristel CLEAN sur une lingette Tristel DRY WIPE.



Nettoyez toute la surface du dispositif **jusqu'à ce qu'elle soit visiblement propre**. Insistez particulièrement sur les rainures et les jonctions du dispositif. Utilisez davantage de mousse et de lingettes si nécessaire.

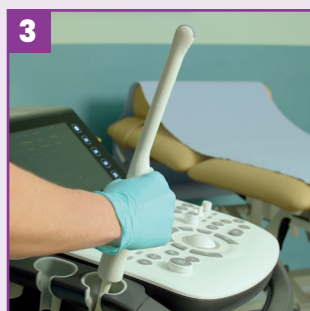

Placez le dispositif sur le **porte-sonde** pendant que vous vous préparez pour l'étape suivante.

Jetez la lingette et les gants usagés conformément aux règles locales. Ne pas réutiliser.



Lavez-vous les mains et enfilez des gants neufs.



Déposer **deux doses** de Tristel DUO ULT sur une lingette Tristel DRY WIPE.




À l'aide de la lingette, étalez la mousse sur la surface de la **sonde et du porte-sonde**. Assurez-vous que toutes les zones sont bien recouvertes. Si nécessaire, utilisez un coton-tige pour faire pénétrer la mousse dans les rainures. Utilisez davantage de mousse et de lingettes si nécessaire.



Placez le dispositif sur le porte-sonde afin de respecter le **temps de contact de 30 secondes**, en veillant à ce que le dispositif reste humide pendant toute la durée du temps de contact.

Jetez la lingette et les gants usagés conformément aux règles locales. Ne pas réutiliser.

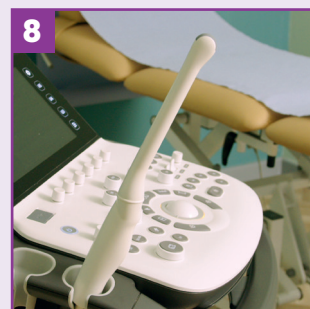

Laissez sécher à l'air libre et rangez le dispositif médical conformément aux protocoles hospitaliers afin d'éviter tout dommage ou autre recontamination.