

NOTES

- Ne pas utiliser Tristel DUO OPH si le flacon est endommagé ou a été ouvert accidentellement.
- Désinfectez-vous les mains et portez des gants ainsi qu'un équipement de protection individuelle (EPI) lors de la manipulation de désinfectants et de dispositifs médicaux. Les recommandations relatives au port de l'EPI peuvent varier selon l'établissement. Veuillez suivre les consignes locales.
- Lorsque vous utilisez Tristel DUO OPH pour la première fois, appuyez deux à quatre fois sur la pompe pour l'amorcer.
- Nettoyez soigneusement les dispositifs médicaux avant de les désinfecter. La présence de souillures résiduelles réduit l'efficacité de tout désinfectant. Respectez le protocole hospitalier et les instructions du fabricant du dispositif.
- Ne pas utiliser sur des métaux tendres ou des aciers inoxydables de qualité inférieure.
- Fermez le bouchon des lingettes Tristel DRY WIPES après chaque utilisation, ne remplissez pas le distributeur de lingettes et ne l'utilisez pas à d'autres fins.
- Ce poster doit être utilisé conjointement avec la notice d'utilisation (IFU), l'étiquette du produit, la fiche de données de sécurité (FDS) et les instructions du fabricant du dispositif.
- Réservé à l'usage des professionnels de santé.

MODE D'EMPLOI



Lavez-vous les mains et enfilez des gants propres, puis déposez **deux doses** de Tristel DUO OPH sur une lingette Tristel DRY WIPE.



Petits dispositifs : Placez le dispositif directement dans la mousse et utilisez la lingette pour vous assurer que toutes les surfaces du dispositif sont bien recouvertes.



Grands dispositifs : Utilisez la lingette pour répartir la mousse sur la surface du dispositif médical et assurez-vous que toutes les zones sont bien recouvertes.



Veillez à ce que le produit reste en contact avec la surface pendant au moins **30 secondes**. Jetez la lingette et les gants usagés conformément aux règles locales. Ne pas réutiliser.



Lavez-vous les mains et enfilez des gants neufs.



Prenez **une** lingette Tristel DRY WIPE du flacon et refermez bien le bouchon. **Essuyez la surface du dispositif** pour éliminer les résidus et le sécher. Insistez particulièrement sur les rainures et les jonctions.



Jetez la lingette et les gants usagés conformément aux règles locales. Ne pas réutiliser. Conservez les dispositifs médicaux conformément aux protocoles hospitaliers afin d'éviter tout dommage ou toute recontamination.