

DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU POUR LES PRISMES DE TONOMÈTRE RÉUTILISABLES

NOTES

- Ne pas utiliser si le flacon est endommagé.
- Désinfectez-vous les mains et portez des gants ainsi qu'un équipement de protection individuelle (EPI) lors de la manipulation de désinfectants et de dispositifs médicaux.
- Lorsque vous utilisez Tristel DUO OPH pour la première fois, appuyez deux à quatre fois sur la pompe pour l'amorcer.
- Nettoyez soigneusement les dispositifs médicaux avant de les désinfecter. La présence de souillures résiduelles réduit l'efficacité de tout désinfectant. Respectez le protocole hospitalier et les instructions du fabricant du dispositif médical.
- Ne pas utiliser sur des métaux tendres ou des aciers inoxydables de qualité inférieure.
- Ce poster doit être utilisé conjointement avec la notice d'utilisation (IFU), l'étiquette du produit, la fiche de données de sécurité (FDS) et les instructions du fabricant du dispositif.
- Réservé à l'usage des professionnels de santé.

MODE D'EMPLOI




Placez une lingette sèche dans la paume de votre main et appliquez deux doses de Tristel DUO OPH.



Placez le dispositif directement dans la mousse et utilisez la lingette pour vous assurer que toutes les surfaces du dispositif sont bien recouvertes.

Remarque : Jetez la lingette et les gants usagés conformément aux règles locales. Ne pas réutiliser.

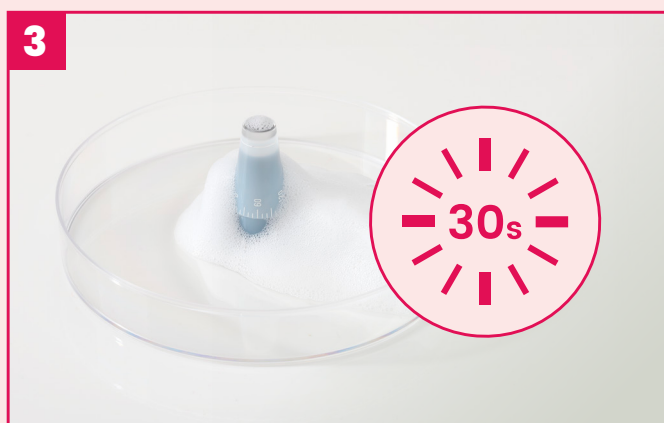

Veillez à ce que le dispositif reste humide pendant au moins 30 secondes de temps de contact. Laissez sécher à l'air libre.



Rincez le dispositif médical à l'eau de qualité appropriée.

Remarque : Séchez et rangez le dispositif médical conformément aux protocoles de l'établissement afin d'éviter tout dommage ou toute recontamination.