


NOTES

- Ne pas utiliser Tristel VISICLEAN ou Tristel DUO ULT si l'un des flacons est endommagé ou s'il a été ouvert accidentellement.
- Désinfectez-vous les mains, portez des gants et un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation des détergents, des désinfectants et des dispositifs médicaux.
- Ne pas utiliser sur les métaux tendres ou l'acier inoxydable de qualité inférieure.
- Utilisez des cotons-tiges pour appliquer Tristel VISICLEAN et Tristel DUO ULT dans les zones difficiles d'accès, comme les indentations ou les crevasses.
- Refermer le couvercle du distributeur de lingettes Tristel DRY WIPES après chaque utilisation. Ne pas remplir le distributeur ou l'utiliser à d'autres fins.
- Réservé aux professionnels de la santé.
- Cette notice d'utilisation doit être utilisée conjointement avec l'étiquette du produit, la fiche de données de sécurité (FDS) et les instructions du fabricant du dispositif.
- Tristel VISICLEAN et Tristel DUO ULT peuvent également être utilisés sur le câble et la prise du dispositif. Répétez les instructions d'utilisation à l'aide d'une nouvelle lingette Tristel DRY WIPE.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

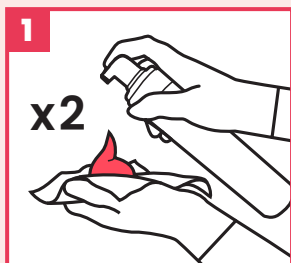

En portant des gants propres, appliquez **2 doses** de Tristel VISICLEAN sur une lingette sèche Tristel DRY WIPE.




Recouvrez la surface du dispositif, puis essuyez jusqu'à ce que toutes les souillures visibles soient éliminées et que la coloration soit uniforme. Portez une attention particulière aux indentations et aux jointures le long du dispositif. Utilisez plus de mousse et de lingettes si nécessaire.

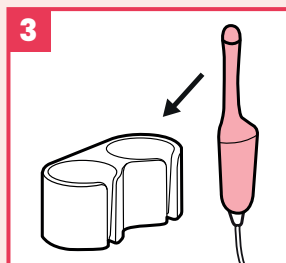


Placez le dispositif sur le **porte-sonde** pendant que vous vous préparez à l'étape suivante. Jetez la lingette et les gants usagés conformément aux réglementations locales. Ne pas les réutiliser.




Lavez-vous les mains et mettez de nouveaux gants.

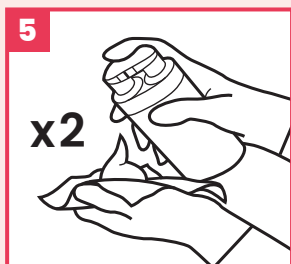


Déposez **deux doses** de Tristel DUO ULT sur une lingette sèche Tristel DRY WIPE.

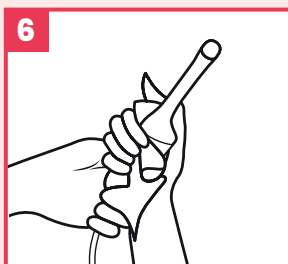

Étalez la mousse sur la sonde et le porte-sonde à l'aide de la lingette, en veillant à éliminer toute trace de couleur. Si nécessaire, utilisez un coton-tige pour atteindre les indentations. Utilisez plus de mousse et de lingettes si nécessaire.

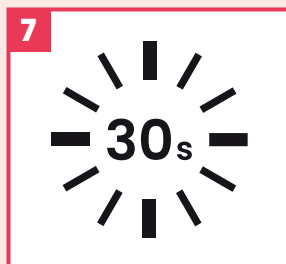

Placez le dispositif sur le porte-sonde. Veillez à ce que la surface du dispositif reste humide pendant toute la durée du temps de contact de **30 secondes**. Jetez la lingette et les gants usagés conformément aux réglementations locales. Ne pas réutiliser.

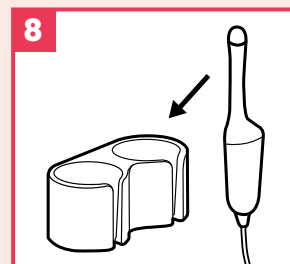

Laissez sécher à l'air libre et stockez le dispositif médical conformément aux protocoles hospitaliers afin d'éviter tout dommage ou recontamination.