

# JET

C

**JET EST UNE MOUSSE SPORICIDE À BASE DIOXYDE DE CHLORE (ClO<sub>2</sub>) POUR LA DÉSINFECTION DES SURFACES MÉDICALES NON-POREUSES ET DES DISPOSITIFS MÉDICAUX NON-INVASIFS.**

NON DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ SUR DES SONDÉS ÉCHOGRAPHIQUES OU DES DISPOSITIFS MÉDICAUX INVASIFS.

## COMMENT L'UTILISER ?



1 Pour assembler JET, prenez un pulvérisateur, dévissez les bouchons des flacons et en suivant les indicateurs rouge A et bleu B sur l'étiquette du flacon, insérez les tubes dans les goulots respectifs des flacons.



2 Fixez les leviers dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de chaque côté de votre pulvérisateur. Assurez-vous que la buse soit alignée sur la ligne supérieure de la tête du pulvérisateur. JET est maintenant prêt à l'emploi.



3 Appliquez au moins 2 doses sur une lingette.



4 Essuyez sur la surface.



5 Assurez-vous que la surface reste humide pendant le temps de contact d'une minute. Laissez sécher à l'air.



6 Quand vous ne pouvez pas recycler, réutilisez ! Lisez la section "GRAND IMPACT" ci-dessous pour en savoir plus.

## CONTRÔLES AVANT UTILISATION

Quelques rappels importants avant de commencer :

- Avant toute utilisation, lisez l'étiquette, les fiches de sécurité (FDS) et les informations concernant le produit.
- Portez les équipements de protection individuelle (EPI) appropriés.
- Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
- JET est uniquement destiné à un usage professionnel.
- N'appliquez pas JET sur des surfaces en laiton, cuivre, aluminium, acier doux ou argent.
- Nettoyez, rincez et séchez soigneusement la surface avant utilisation.



Consultez le guide utilisateur pour des instructions complètes.

## GRAND IMPACT

Votre pulvérisateur JET doit être réutilisé avec le second flacon JET.

Pour ce faire, dévissez les leviers dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer le pulvérisateur.

Avant de suivre les instructions d'assemblage ci-dessus, rincez soigneusement les tubes à l'eau du robinet et séchez-les avec une serviette en papier.

Après utilisation, les flacons JET vides et les bouchons peuvent être envoyés au recyclage.

## CONDITIONS DE STOCKAGE

JET peut être conservé pendant 2 ans avant d'être utilisé et doit être stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, entre 10°C et 35°C.

**cache**<sup>™</sup>  
Désinfection sporicide  
des surfaces



**Tristel Solutions Ltd**  
Unit 1b, Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell,  
Cambridgeshire, CB8 7NY, UK - T: +44 (0) 1638 721500  
E: mail@tristel.com - W: www.thecachecollection.com



Tristel SA, Smallandlaan 14B, 2660 Anvers, Belgique  
T: +32 (0)3 889 26 40 - E: belgium@tristel.com - W: www.thecachecollection.com/be-fr/  
Tristel SAS, Boulevard de la Liberté 130, 59000 Lille, France  
T: +33 (0)3 66 88 01 84 - E: france@tristel.com W: www.thecachecollection.com/fr-fr/