


Tristel Duo™

ORL

POUR LES
NASOFIBROSCOPES
FLEXIBLES

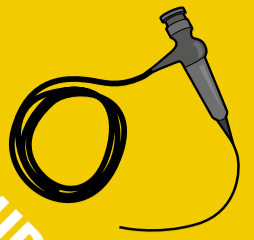

Mousse de désinfection de haut niveau

Notes:


- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Se désinfecter les mains et porter des Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés lors de la manipulation des désinfectants et des dispositifs médicaux.
- Si Tristel Duo ORL est utilisé pour la première fois, appuyer entre deux à quatre fois sur la pompe pour l'amorcer.
- Uniquement pour utilisation sur des instruments pré-nettoyés.
- Uniquement pour utilisation professionnelle.
- La date de péremption mentionnée ne change pas quelle que soit la date d'ouverture des flacons.
- Ce protocole doit être utilisé conjointement avec l'étiquette du produit, la Fiche de Données de Sécurité (FDS) et les instructions du fabricant du dispositif.

ÉTAPE 1



Appliquez deux doses de Tristel Duo ORL sur une lingette sèche (de préférence Duo Wipes).


ÉTAPE 2

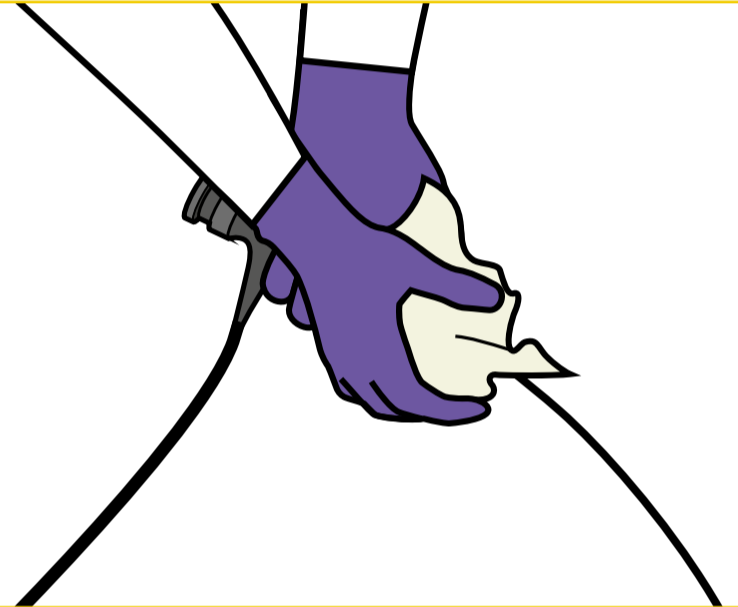

Utilisez la lingette pour répartir la mousse sur la surface du dispositif médical pré-nettoyé et assurez-vous que toutes les zones soient couvertes. L'essuyage continu de la surface n'est pas nécessaire et doit être évité pour ne pas endommager la lingette.

Note: jetez la lingette utilisée conformément aux consignes locales. Ne pas laisser macérer. Ne pas réutiliser.

ÉTAPE 3

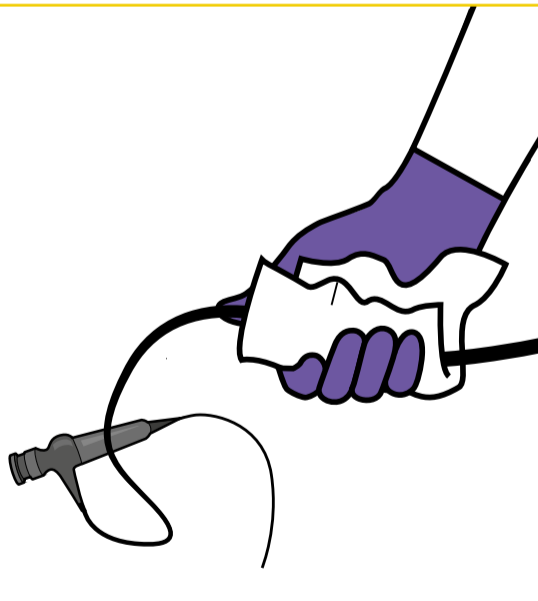



Utilisez Tristel Duo ORL pour réaliser la désinfection de haut niveau des autres surfaces du dispositif.

ÉTAPE 4



Laissez sécher le produit sur la surface pendant au moins **30 secondes**.

ÉTAPE 5

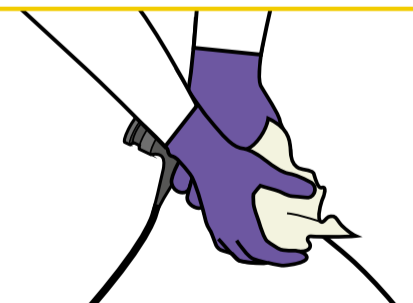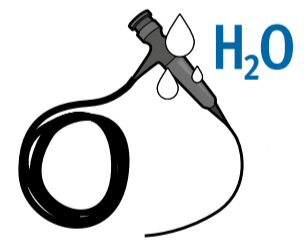

Rincez le dispositif avec de l'eau de qualité appropriée.

Note: conservez le dispositif médical conformément aux protocoles hospitaliers pour éviter tout dommage ou recontamination.

Tristel™

Établi par: Tristel Solutions Limited, Unit 1b Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Pour des informations sur les brevets, visitez: <http://www.our-patents.info/tristel>

France: Tristel SaS, 130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille
T 03 66 88 01 84 - E france@tristel.com - W www.tristel.com/fr-fr/

Belgique et GD Luxembourg: Tristel SA, Smalldanlaan 14 B, 2660 Anvers, Belgique
T 03 889 26 40 - E belgium@tristel.com - W www.tristel.com/be-fr/

Suisse: Tristel AG, Sandgrube 29, CH-9050, Appenzell
T +41 715670658 - E schweiz@tristel.com - W tristel.com/de

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Wal-2119-2
28/JUN/2023