



Tristel Fuse™ for Surfaces

Tristel Fuse 消毒液 高層次消毒及消滅芽孢菌之解決方案

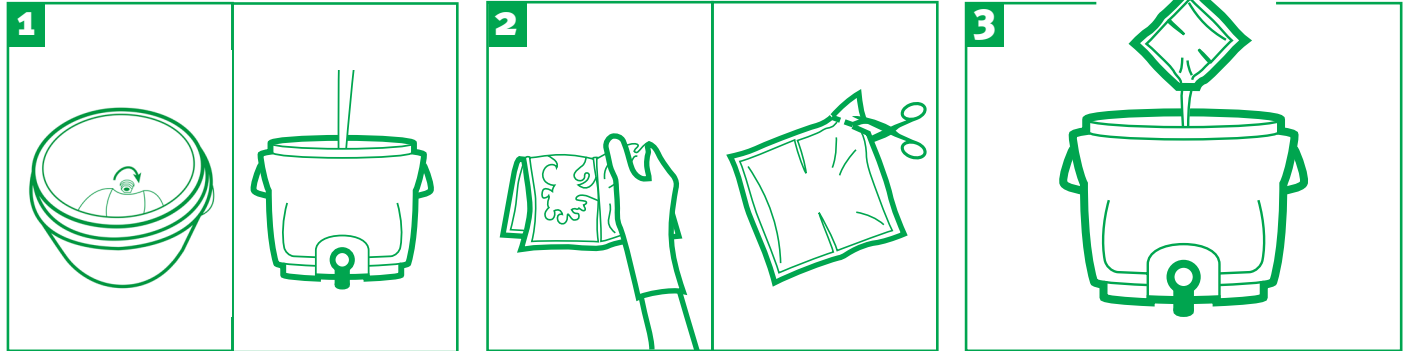

- 第一次使用TANK之前，請從內部擰緊去水位。
- 於TANK內加入5公升室溫清水。
注意：切勿使用熱水。
- 將FUSE消毒液包裝袋對折，然後擠壓一側，使兩邊液體流通中間隔膜，消毒液會轉為黃色。FUSE消毒液現在可以被稀釋。
- 剪掉包裝袋一角，將FUSE消毒液倒入TANK中。傾倒時可將消毒液包裝袋放在水線以下，以避免濺出消毒液。

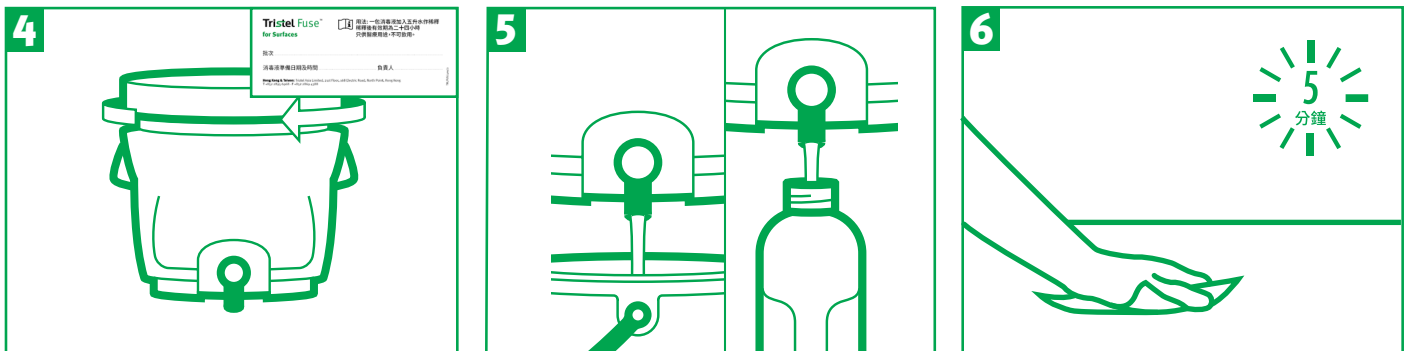

- 蓋上TANK蓋子，並確保完全關閉。稀釋好的消毒液最多可保存24小時。
- 記錄批次、製備日期、時間及負責人員在提供的標籤上。
- 可從TANK前方的水龍頭將工作溶液倒入較小容量的瓶子或容器中。
- 稀釋好的FUSE消毒液，可用擦拭布擦拭表面。
- 確保至少5分鐘的接觸時間，並讓表面自然風乾。

注意事項：

- 使用前請檢查消毒液到期日。
- 在通風良好的環境下準備消毒液。
- 執行高層次消毒過程中，請配戴合適的個人防護裝備(PPE)。脫下防護裝備後請洗手。
- 接觸消毒液可能會引起輕微刺激。避免與皮膚和眼睛接觸。如需要可用大量肥皂及清水沖洗皮膚患處。若消毒液接觸到眼睛，請立即用大量清水沖洗並尋求醫療協助。
- 消毒液需儲存於陰涼及通風良好的地方，避免陽光直接照射。存放於10°C至35°C為佳。
- 請勿用於布藝家具或紡織品上。
- 請依據醫院相關規定丟棄包裝。
- 放置TANK在防滑表面上並保持平穩。
- 每次使用後請沖洗並擦乾TANK。
- 如果包裝袋破損，切勿使用。
- 請勿於TANK上放置物品。
- 僅供專業醫療用途。
- 準備新消毒液前請清潔標籤。

Tristel

Created by: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Hong Kong & Taiwan: 21st Floor, 168 Electric Road, Fortress Hill, Hong Kong
T +852 2895 6968 - F +852 2869 4388 - E customerservicehk@tristel.com

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Wal-1350-1 - October 2020

For Tristel patent information please visit: <http://www.our-patents.info/tristel>