

# 已準備好使用 POD CLO2 10<sup>+5</sup> 消毒膠囊 和 TANK 10 CLO2 容器?



## 使用前檢查

### 重要提醒：

- ✓ 確保安全使用殺菌劑。使用前請閱讀產品上的標籤、安全資料表 (SDS) 和產品資訊。
- ✓ 如果 **POD CLO2 10<sup>+5</sup>** 消毒膠囊出現損壞或意外打開，請勿使用。
- ✓ **POD CLO2 10<sup>+5</sup>** 僅供專業醫療用途。
- ✓ 不適用於黃銅、銅、鋁、低碳鋼或銀表面。
- ✓ 使用前請確保表面已去除明顯污漬。
- ✓ **POD CLO2 10<sup>+5</sup>** 消毒膠囊一旦使用，就不可重新密封。
- ✓ 在準備消毒液之前，請參閱您的容器使用者指南，以了解設定和應用說明。
- ✓ 請確保容器已被清空。容器應被放置於平坦的表面上，並靠近水源。
- ✓ 於注入水前水龍頭必須關妥！
- ✓ 為了達到 **POD CLO2 10<sup>+5</sup>** 消毒膠囊的預期用途，請仔細遵循所提供的說明。

## 如何使用



1 在容器內加入 5 公升清水。  
切勿使用熱水。



2 將一個 **POD CLO2 10<sup>+5</sup>** 消毒膠囊膠面朝下放入容器空格中，並合上蓋子使其破裂。



3 打開蓋子，取走已清空的膠囊。經沖洗後，膠囊可作回收。



4 再倒入 5 公升清水於容器內，然後合上蓋子。



5 等待 15 分鐘，方可使用消毒劑。



6 稀釋好的消毒液可於容器內保存 5 天。請在用戶指南中取出圓形記錄表，並記下消毒液的準備時間和日期以便進行記錄，然後把記錄表放入容器上的三角形口袋中。



7 向上打開水龍頭，然後將消毒液倒入可重複使用的 **TANK CLO2 瓶子** 作使用準備。



8 在每個倒入消毒液的瓶子上，可用油性箱頭筆記錄消毒液準備日期和時間。當消毒液從容器倒出後，消毒液需在 24 小時內使用。



9 把消毒液倒在乾的擦拭巾，或直接倒在需要擦拭的表面，然後進行擦拭。



10 確保最少 5 分鐘接觸時間。

詳情請參閱使用手冊。

cache™



Tristel Solutions Ltd  
Unit 1b, Lynx Business Park, Fordham Road,  
Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK  
T +44 (0) 1638 721500 - E [mail@tristel.com](mailto:mail@tristel.com) - W [www.tristel.com](http://www.tristel.com)

HONG KONG:  
Tristel Asia Limited  
21st Floor, 168 Electric Road, Hong Kong  
T +852 2895 6968 - E [customerservicehk@tristel.com](mailto:customerservicehk@tristel.com) - W [www.tristel.com](http://www.tristel.com)

Copyright © Tristel Solutions Limited  
Mkt-Wel-2917-1  
12/SEP/2024