

Tristel Trio™

Wipes System

La soluzione completa per la disinfezione di alto livello dei dispositivi medici invasivi non canalizzati.




Per le istruzioni complete, fare riferimento al manuale utente.

Note:

- Seguire i protocolli ospedalieri e le istruzioni dei produttori dei dispositivi medici.
- Igienizzare le mani e indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati quando si utilizzano disinfettanti e dispositivi medici.
- Accertarsi di non frizionare o piegare lo strumento. Prestare attenzione alle sporgenze e alle rientranze dello strumento.
- Prepararsi al ciclo di decontaminazione prendendo dalla scatola una Salvietta di ciascun tipo e la Schiuma di Attivazione.
- Non utilizzare oltre la data di scadenza. La data di scadenza e il numero di lotto sono riportati sul retro della scatola.
- Non utilizzare se la confezione della salvietta è danneggiata, o la salvietta appare scolorita, danneggiata o asciutta.
- Se necessario, usare più di una Salvietta per assicurarsi che lo strumento sia visibilmente pulito.
- Tenere i sacchetti delle Salviette fino al termine del processo di decontaminazione, serviranno a compilare il registro di tracciabilità Tristel.
- Smaltire le Salviette e i guanti conformemente alle norme vigenti.
- Seguire il protocollo ospedaliero per designare un'area pulita e un'area sporca.
- Solo per uso professionale.

PER OTTICHE
RIGIDE E FLESSIBILI

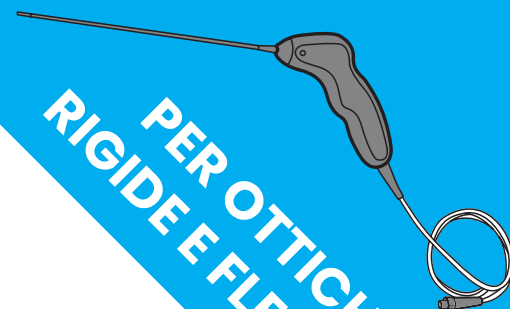

STEP 1 : PULIZIA



Estrarre la Salvietta Detergente dal suo sacchetto e aprirla nel palmo della mano.

Pulire il nasofaringoscopia per rimuovere lo sporco visibile.

Adagiare lo strumento nell'area sporca.

Smaltire le Salviette e i guanti conformemente alle norme vigenti.

Igienizzare le mani e indossare un nuovo paio di guanti.



STEP 2a + 2b : ATTIVAZIONE



Estrarre la Salvietta Sporidica dal sacchetto e aprirla sul palmo della mano.

Applicare due dosi di schiuma sulla Salvietta Sporidica.

Ripiegare la Salvietta su sé stessa e comprimerla per **15 secondi** per generare il diossido di cloro.

Assicurarsi che la Salvietta sia completamente coperta di schiuma.

Utilizzare la Salvietta attivata immediatamente.



STEP 2 : DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO



Strofinare la superficie del nasofaringoscopia in un unico movimento unidirezionale per coprirlo con la schiuma, assicurandosi che tutta la superficie entri in contatto con la Salvietta.

Smaltire le Salviette e i guanti conformemente alle norme vigenti.

Lasciar agire per **30 secondi**.

Adagiare lo strumento nell'area pulita.



STEP 3 : RISCIAQUO



Estrarre la Salvietta Risciacquante dal suo sacchetto e aprirla sul palmo della mano.

Pulire il nasofaringoscopia per rimuovere la schiuma in eccesso.

Smaltire le Salviette e i guanti conformemente alle norme vigenti.

Igienizzare le mani.



STEP 4 : TRACCIABILITÀ



Il Sistema di Salviette Trio consente la tracciabilità cartacea o digitale:

- Il Registro di Tracciabilità Tristel è utilizzato per documentare i cicli di decontaminazione effettuati con il Sistema di Salviette Trio.
- Tristel 3T è un sistema di tracciabilità digitale composto dal portale online per la gestione dei dati e la compilazione dei report, e una App per registrare le procedure di decontaminazione del Sistema di Salviette Trio. L'App 3T include un'opzione per visualizzare i training di formazione per facilitare lo svolgimento della procedura.

Entrambi i sistemi consentono di registrare tutte le informazioni necessarie per la tracciabilità completa del reprocessing.