

L'UNICO DISINFETTANTE DI ALTO LIVELLO TESTATO E CONVALIDATO COME EFFICACE CONTRO L'HPV IN 30 SECONDI

Esistono più di 200 diversi tipi di virus del papilloma umano (HPV). I genotipi 16 e 18 sono considerati responsabili di circa il 70% dei casi di tumori della cervice. Uno studio scientifico condotto da Meyers et al. (2020) dimostra che Tristel Duo ULT è efficace in 30 secondi sulle sonde ecografiche transvaginali contro i genotipi ad alto rischio 16 e 18 dell'HPV.

Tristel Duo ULT è studiato per la disinfezione di alto livello delle sonde ecografiche endocavitare, sonde transcutanee (incluse quelle utilizzate durante le procedure invasive ecoguidate), dei supporti per sonde, cavi, spine, tastiere, monitor e anche dei dispositivi medici portatili collegati ad un terminale mobile.

TRISTEL DUO ULT È FACILE DA USARE: APPLICA, STROFINA E LASCIA AGIRE!



APPLICA DUE DOSI DI SCHIUMA DUO ULT SU UNA SALVIETTA ASCIUTTA (SI SUGGERISCONO LE DUO WIPES)



DISTRIBUIRE LA SCHIUMA SULLA SUPERFICIE DELLA SONDA, ASSICURANDOSI CHE TUTTE LE AREE ENTRINO A CONTATTO CON LA SCHIUMA.



LASCIARE AGIRE PER ALMENO 30 SECONDI.

Tristel DuoTM
ULT

Tristel Duo ULT è un dispositivo medico di Classe IIb a marchio CE conformemente alla Direttiva europea sui dispositivi medici 93/42/CEE e ai suoi relativi emendamenti 2007/47/CE.

Le Salviette Asciutte Duo Wipes sono un dispositivo medico di Classe I conformemente al Regolamento europeo sui dispositivi medici (MDR 2017/745).



EFFICACE

Tristel Duo ULT ha un'azione sporicida, micobattericida, virucida, fungicida e battericida con un tempo di contatto di 30 secondi.

Questo prodotto è stato ampiamente testato in conformità agli standard europei in materia di prove di sospensione e metodologie standardizzate che prevedono l'inoculo delle superfici dei dispositivi medici con uno specifico microorganismo. Il diossido di cloro di Tristel è efficace contro agenti patogeni di rilevanza nosocomiale, come:

- *Bacillus subtilis*
- *Mycobacterium terrae*
- **Human Papillomavirus (HPV)**
- Virus dell'epatite B (HBV)
- Virus dell'immunodeficienza umana (HIV)
- Herpes Simplex Virus Type 1
- *Aspergillus brasiliensis*
- *Candida albicans*
- *Escherichia coli*
- *Neisseria gonorrhoeae*
- *Staphylococcus aureus*
- *Gardnerella vaginalis*
- *Streptococcus agalactiae*
- Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi (CRE)
- *Klebsiella pneumoniae*
- Enterococchi resistenti alla vancomicina (VRE)
- *Enterococcus faecium*
- *Staphylococcus aureus* resistente alla meticillina (MRSA)



SEMPLICE

La formazione e la certificazione sono elementi fondamentali del servizio clienti di Tristel. Il nostro portale di formazione online offre formazione agli utilizzatori del Tristel Duo ULT nel momento e nel luogo a loro più conveniente.



CONVENIENTE

Tristel Duo ULT non richiede onerosi investimenti in apparecchiature o contratti di manutenzione. Due dosi di schiuma e una Salvietta Asciutta Duo Wipes è tutto ciò che occorre per completare la disinfezione di alto livello.



MOBILE

Tristel Duo ULT può essere utilizzato ovunque sia necessario, senza limitazioni tipiche dei sistemi di disinfezione automatici. Tristel Duo ULT è ideale anche in aree remote dove l'accesso all'elettricità o all'acqua è limitato.



COMPATIBILE

Tristel Duo ULT è stato testato e confermato compatibile con i dispositivi medici dei produttori più importanti, tra cui:

- Alpinion Medical
- BD (Bard Access)
- BK Medical
- Butterfly Network
- Canon Medical
- Carestream
- Esaote
- FUJIFILM SonoSite
- GE Healthcare
- Healcerion
- Hitachi
- Mindray
- Philips
- Quantel Medical
- Samsung Healthcare
- Sonoscape
- Supersonic Imagine

APPLICAZIONI


Tristel Duo ULT è l'unico disinfettante di alto livello ideale per tutte le parti delle sonde ecografiche. È anche l'unico disinfettante di alto livello che può viaggiare insieme ai dispositivi medici portatili per consentire sempre la decontaminazione adeguata con un protocollo semplice e completo.

MONITOR

SUPPORTO

SPINA

CAVO

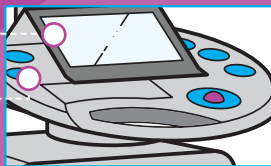

SCHERMO TABLET


DISPOSITIVO PORTATILE



MANICO
SONDA
TRASDUTTORE

SONDA ECOGRAFICA INVASIVA

SONDE ECOGRAFICHE TRANSCUTANEE

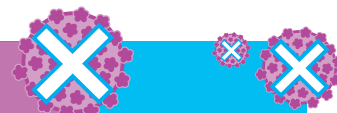

TRISTEL DUO ULT

È EFFICACE CONTRO L'HPV SU DISPOSITIVI MEDICI*

SCOPRI DI PIÙ: BIT.LY/HPVARTICLE

*Meyers, C., Milici, J., Robison, R. (2020) "The Ability of Two Chlorine Dioxide Chemistries to Inactivate Human Papillomavirus-contaminated Endocavitary Ultrasound Probes and Nasendoscopes" DOI: 10.1002/jmv.25666.

Le Salviette Asciutte Duo Wipes sono studiate per l'applicazione di Tristel Duo ULT.

Le Salviette Asciutte Duo Wipes sono realizzate al 100% in tessuto non tessuto, in polipropilene (18 gsm) che non lascia residui e sono pretagliate per facilitarne l'estrazione dalla confezione.

L'uso delle Duo Wipes consente il rilascio efficace del disinfettante sulla superficie dello strumento.



DUO WIPES

- 200 salviette per barattolo/6 barattoli per confezione

TRISTEL DUO ULT

- Soluzione Base Tristel (acido citrico) da 125ml + Soluzione di Attivazione Tristel (clorito di sodio) da 125ml.

La formula chimica a base di diossido di cloro brevettata da Tristel si genera quando queste due soluzioni vengono miscelate mediante l'azionamento della testa del flacone.

- 310 dosi per flacone/ 155 procedure di disinfezione/6 flaconi per confezione

DUO DOK

- Progettato per tenere a portata di mano Tristel Duo ULT
- 5 per confezione

Tristel

Decontaminazione di strumenti medici

Prodotto da:

Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Distributore esclusivo in Italia:

Tristel Italia S.r.l., Via E. Collamarini, 14 40138 Bologna
T 051 0014912 - E infoitalia@tristel.com - W www.tristel.it

Per le informazioni sui brevetti Tristel, visitare la pagina: <http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Bro-1732-1
11/OCT/2021

Pagina 2 di 2

Tristel
WE HAVE CHEMISTRY.