


Tristel Duo™

OPH

PER TONOMETRI
RIUTILIZZABILI

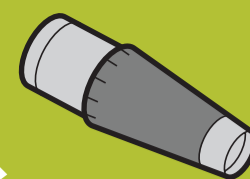

Schiuma disinfettante di alto livello

Note:

- Non utilizzare il flacone se non è integro.
- Igienizzare le mani ed indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei prima di maneggiare il disinfettante e lo strumento.
- Quando il flacone viene usato per la prima volta occorre premere il pulsante di erogazione dalle due alle quattro volte per caricare la schiuma.
- Se la superficie è visibilmente sporca, seguire le istruzioni per la pulizia secondo il protocollo ospedaliero.
- Per uso professionale.
- Queste istruzioni per l'uso devono essere consultate insieme all'etichetta del prodotto, alle schede tecniche e alle istruzioni per l'uso del produttore del dispositivo medico.

STEP 1



Rilasciare due dosi di Tristel Duo direttamente sullo strumento oppure su una salvietta (si consiglia l'utilizzo delle Duo Wipes).

STEP 2



Stendere la schiuma sullo strumento in modo uniforme con la salvietta, assicurandosi che tutta la superficie ne venga in contatto. Non occorre strofinare in modo eccessivo poiché potrebbe causare il rilascio di residui di fibra dalla salvietta.

Nota: smaltire la salvietta utilizzata in conformità alle normative vigenti. Non macerare. Non riutilizzare.

STEP 3



Lasciare agire per un minimo di **30 secondi**.

STEP 4



Risciacquare lo strumento con acqua di qualità appropriata.

Nota: conservare lo strumento secondo il protocollo ospedaliero per evitare qualsiasi danno o ricontaminazione.

Tristel™

Prodotto da: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park,
Cams, UK, CB8 7NY
E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Distributore esclusivo in Italia: Tristel Italia S.r.l.,
Via E. Collamarini 14, 40138 Bologna
T 051 001 4912- E infoitalia@tristel.com

Per le informazioni sui brevetti Tristel, visitare la pagina <http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Wal-574-2
February 2020