

'S WERELDS MEEST ERKENDE, GEVALIDEERDE & GEBRUIKTE HOOG-NIVEAU DESINFECTIE WIPES SYSTEEM

Tristel Trio™
Wipes System

Toepassingen:

- Nasofaryngoscopen
- Nasendoscopen
- Vaginale and rectale sondes
- TEE-sondes
- Video-laryngoscopen
- Manometrie katheters
- Oftalmologische instrumenten

Tristel Trio Wipes System bevat geen alcohol noch ammoniumchloriden.



**VERNIETIGT HPV
TYPES 16 & 18
IN 30 SECONDEN***

HET TRISTEL TRIO WIPES SYSTEM IS EENVOUDIG TE GEBRUIKEN!



REINIG

Tristel Pre-Clean Wipe

Een niet-geweven doekje geïmpregneerd met een driefvoudig enzymatisch detergent en een tensio-actieve stof om een grondige reiniging van het oppervlak te bekomen.



DESINFECTEER OP HOOG-NIVEAU

Tristel Sporicidal Wipe

Dit doekje gecombineerd met de Tristel Activator Foam genereert chloordioxide, een krachtig biocide dat een hoog-niveau desinfectie garandeert binnen een uniforme contacttijd van 30 seconden.



SPOEL

Tristel Rinse Wipe

Een steriel verpakt, niet-geweven doekje geïmpregneerd met gedemineraliseerd water en een laag antioxidantengehalte. Het doekje wordt gebruikt om residu van het oppervlak te verwijderen.



TRACEER

3T of het manueel logboek

Het manueel logboek documenteert elke desinfectieprocedure met pen en papier. 3T digitaliseert dit proces voor een efficiëntere, accuratere en slimmere traceerbaarheid.

* Meyers, C., Milici, J., Robison, R. (2020) 'The Ability of Two Chlorine Dioxide Chemistries to Inactivate Human Papillomavirus-contaminated Endocavitary Ultrasound Probes and Nasendoscopes' DOI: 10.1002/jmv.25666

WERKZAAM

De Tristel Sporidical Wipe is werkzaam als hoog-niveau desinfectiemiddel volgens EN 14885 en de meest recente werkzaamheidsstandaarden, op 30 sec tijd.

De snelle en uniforme contacttijd van het product laat geen ruimte voor twijfel of fouten.

SNEL

Volledige desinfectieprocedure, inclusief traceerbaarheid, in enkele minuten.

TRACEERBAAR

Het Tristel Trio Wipes System omvat papieren of digitale traceerbaarheid. Het wijdverspreide manueel logboek legt elke desinfectieprocedure vast met pen en papier.

3T digitaliseert dit proces voor een efficiëntere, accuratere en slimmere traceerbaarheid.

FLEXIBEL

Het Tristel Trio Wipes System is een mobiele oplossing die in de consultatie- én desinfectieruimtes kan gebruikt worden.

Deze flexibiliteit elimineert de nood om het Hulpmiddel naar de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) te sturen, waardoor u kostbare tijd bespaart.

ECONOMISCH

Geen investering nodig in machines en onderhoudscontracten.

VELIG

De Tristel Sporidical Wipe is niet-toxisch voor embryo's en kan dus gebruikt worden in IVF omgevingen.

COMPATIBEL

Het Tristel Trio Wipes System is getest en compatibel verklaard met de medische hulpmiddelen van meer dan 40 fabrikanten, waaronder:

- Advanced Tactile Imaging, Inc.
- Airtraq*
- Arthrex
- ATMOS MedizinTechnik
- BD (Bard Access, CareFusion)
- BK Medical
- Butterfly Network
- Canon Medical Systems
- Carestream
- Clarius Mobile Health
- Clarus Medical
- DWL Compumedics
- Echosens
- Esaote*
- Exact Imaging
- Fisher & Paykel
- Fujifilm (Hitachi)
- FUJIFILM SonoSite
- GE Healthcare
- Haag-Streit
- Karl Storz
- Laborie
- Machida Endoscope Co.
- MCube
- Medcom
- Mindray
- Neoplas Tools
- Ocular Instruments Inc
- Optim LLC
- Orlvision
- Pentax
- Philips
- Polydiagnost
- Samsung Healthcare
- SapiMed
- Siemens Healthineers
- Southern Scientific / Care Wise
- tic Medizintechnik
- SonoScape*
- Verathon
- Xion Medical

*Compatibel met de Tristel Sporidical Wipe als deel van het Tristel Trio Wipes System.

Het Tristel Trio Wipes System biedt een volledige ontsmetting van medische hulpmiddelen zonder werkkanaal. Dankzij het concept van reiniging, hoog-niveau desinfectie en spoeling wordt een gevalideerd resultaat bereikt met een simpel en snel drie-stappen proces.



MICROBIOLOGISCHE TESTRAPPORTEN

	Europese Normen (EN)	Uniforme Contacttijd
Bacteriën	EN 13727	
	EN 14561	
	EN 16615	
Gisten/ Schimmels	EN 13624	
	EN 14562	
	EN 16615	
Virussen	EN 14476	
Mycobacteriën	EN 14348	
	EN 14563	
Sporen	EN 17126	

TRISTEL TRIO WIPES SYSTEM ⁵⁰

- 1 doos bevat 50 desinfectieprocedures, beschikbaar met het manuele logboek.
- 3T is beschikbaar op iOS en de Google Store.



VERVOER VAN MEDISCHE HULPMIDDELEN

Tristel Protect bags zijn speciaal ontworpen voor het vervoer en de korte-termijn opslag van medische hulpmiddelen, met traceerbaarheid in gedachten.

TRISTEL PROTECT

- 50 zakken per doos.
- Beschikbaar in small (21cm x 34cm) voor laryngoscopen en large (31cm x 71cm) voor nasofaryngoscopen.



Meer informatie over het Tristel Trio Wipes System, zoals veiligheidsinformatiebladen, rapporten, publicaties over materialen en studies, is beschikbaar op aanvraag of online via: www.tristel.com

Tristel™

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie

België: Tristel NV, Smallandlaan 14 B, 2660 Antwerpen, België
T +32 (0)3 889 26 40 - E belgium@tristel.com - W www.tristel.com/be-be/

Nederland: Tristel B.V., Wattstraat 4, 4004 JS Tiel, Nederland
T +31 020 808 51 34 - E nederland@tristel.com - W www.tristel.com/nl-nl/

Tristel Solutions Ltd, Unit 1b, Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Voor informatie over de octrooien:
<http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions Limited
Mkt-Bro-720 - 24/OCT/2024 - V7