


'S WERELDS MEEST ERKENDE, GEVALIDEERDE & GEBRUIKTE HOOG-NIVEAU DESINFECTIE WIPES SYSTEEM

Voor medische hulpmiddelen zonder werkkanaal zoals:

- Nasofaryngoscopen
- Vaginale and rectale sondes
- TEE-sondes
- Video-laryngoscopen
- Manometrie katheters
- Oftalmologische instrumenten

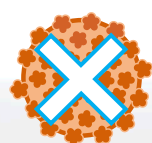

**VERNIETIGT HPV
TYPES 16 & 18
IN 30 SECONDEN***



*Meyers, C., Milici, J., Robison, R. (2020) 'The Ability of Two Chlorine Dioxide Chemistries to Inactivate Human Papillomavirus-contaminated Endocavitary Ultrasound Probes and Nasendoscopes' DOI: 10.1002/jmv.25666.

HET TRISTEL TRIO WIPES SYSTEM IS EENVOUDIG TE GEBRUIKEN!



REINIG

Tristel Pre-Clean Wipe

Een niet-gewoven doekje geïmpregneerd met een drievoudig enzymatisch detergent en een oppervlakte-actieve stof. Het doekje wordt gebruikt voor een grondige reiniging van het oppervlak om vervuiling en organische materie te verwijderen.



DESINFECTEER OP HOOG-NIVEAU

Tristel Sporicidal Wipe

Dit doekje gecombineerd met de Tristel Activator Foam genereert chloor dioxide, een krachtige biocide dat een hoog-niveau desinfectie levert binnen een uniforme contacttijd van 30 seconden.



SPOEL

Tristel Rinse Wipe

Een steriel verpakt, niet-gewoven doekje geïmpregneerd met gedemineraliseerd water en een laag antioxidantengehalte. Het doekje wordt gebruikt om chemische resten van het oppervlak te verwijderen.



TRACEER

3T of het Audit & Quality Register

Het wijdverspreide Audit & Quality register registreert elke desinfectieprocedure met pen en papier. 3T digitaliseert dit proces voor een efficiëntere, accuratere en slimmere traceerbaarheid.

Tristel TrioTM
Wipes System



WERKZAAM

Het Tristel Sporicidal Wipe is werkzaam bewezen als hoog-niveau desinfectants volgens BS EN 14885 en de meest recente werkzaamheidsstandaarden, op 30 sec tijd. De snelle en uniforme contacttijd van het product laat geen ruimte voor twijfel of fouten.



FLEXIBEL

Het Tristel Trio Wipes System is een mobiele oplossing die in de consultatie- én desinfectieruimtes kan gebruikt worden. Deze flexibiliteit elimineert de nood om het hulpmiddel naar de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) te sturen, waardoor u kostbare tijd bespaart.



COMPATIBEL

Het Tristel Trio Wipes System is getest en compatibel verklaard met de medische hulpmiddelen van meer dan 40 fabrikanten, zoals:

- Advanced Tactile Imaging, Inc.
- Airtraq*
- Arthrex
- ATMOS MedizinTechnik
- BD (Bard Access, CareFusion)
- BK Medical
- Butterfly Network
- Canon Medical Systems
- Carestream
- Clarius Mobile Health
- Clarus Medical
- DWL Compumedics
- Echosens
- Esaote*
- Exact Imaging
- Fisher & Paykel
- Fujifilm (Hitachi)
- FUJIFILM SonoSite
- GE Healthcare
- Haag-Streit
- Karl Storz
- Laborie
- Machida Endoscope Co.
- MCube
- Medcom
- Mindray
- Neoplas Tools
- Ocular Instruments Inc
- Optim LLC
- Orlvision
- Pentax
- Philips
- Polydiagnost
- Samsung Healthcare
- SapiMed
- Siemens Healthineers
- Southern Scientific / Care Wise
- tic Medizintechnik
- SonoScape*
- Verathon
- Xion Medical

*Compatibel met het Tristel Sporicidal Wipe als deel van het Tristel Trio Wipes System



SNEL

Volledige ontsmettingscyclus, inclusief traceerbaarheid, in slechts enkele minuten.



TRACEERBAAR

Het Tristel Trio Wipes System omvat papieren of digitale traceerbaarheid. Het wijdverspreide Audit & Quality Register legt elk ontsmettingsproces vast met pen en papier. 3T digitaliseert dit proces voor een efficiëntere, accuratere en slimmere traceerbaarheid.



ECONOMISCH

Geen investering nodig in machines en onderhoudscontracten.




VEILIG

De Tristel Sporicidal Wipe is niet-toxisch voor embryo's en kan dus gebruikt worden in IVF omgevingen.

Het Tristel Trio Wipes System biedt een volledige ontsmetting van medische hulpmiddelen zonder werkkanaal. Dankzij het concept van reiniging, hoog-niveau desinfectie en spoeling wordt een gevalideerd resultaat bereikt met een simpel en snel drie-stappen proces.



Microbiologische testrapporten

	Europese normen (EN)	Uniforme Contacttijd
Bacteriën	EN 13727	
	EN 14561	
	EN 16615	
Gisten/Fungi	EN 13624	
	EN 14562	
	EN 16615	
Virussen	EN 14476	
Mycobacteriën	EN 14348	
	EN 14563	
Sporen	EN 17126	

TRISTEL TRIO WIPES SYSTEM ⁵⁰

- 1 doos bevat 50 ontsmettingsprocedures, beschikbaar met of zonder het Audit & Quality register.
- 3T wordt apart verkocht.



Meer informatie over het Tristel Trio Wipes System, zoals veiligheidsinformatiebladen, rapporten, publicaties over materialen en studies, is beschikbaar op aanvraag of online via: www.tristel.com

MEDISCH HULPMIDDEL VERVOER

Tristel Protect bags zijn speciaal ontworpen voor het vervoer en korte-termijn opslag van medische hulpmiddelen, met traceerbaarheid in gedachten.

TRISTEL PROTECT

- 50 zakken per doos.
- Beschikbaar in small (21cm x 34cm) voor laryngoscopes en large (31cm x 71cm) voor nasofaryngoscopen.

