



De complete oplossing voor de high-level desinfectie van invasieve medische hulpmiddelen zonder werkkanaal.

 Raadpleeg de gebruikershandleiding voor volledige instructies.



### Opmerkingen:

- Volg altijd de ziekenhuisprotocollen en de instructies van de fabrikant op.
- Ontsmet handen en draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het omgaan met desinfecterende middelen en medische hulpmiddelen.
- Een eerste voorreiniging moet onmiddellijk na gebruik van het medische hulpmiddel volgens het ziekenhuisprotocol worden uitgevoerd.
- Zorg ervoor dat u niet teveel over het instrument wrijft of het buigt, en besteed speciale aandacht aan randen, ribbels, inkepingen en gebieden waar verschillende materialen op elkaar aansluiten.
- Bereid de decontaminatieprocedure voor door elk van de doekjes en het Activatorschuim uit de doos te pakken.
- De probe kan worden opgehangen om de decontaminatieprocedure te vergemakkelijken.
- Niet gebruiken na de vervaldatum. Zie het oppervlak van de doos voor de vervaldatum en het LOT-nummer.
- Niet gebruiken als de verpakking van de doekjes beschadigd is, of als het doekje verkleurd, beschadigd of droog is.
- Gebruik, wanneer nodig, meer doekjes om zeker te zijn dat het instrument zichtbaar schoon is.
- Bewaar de zakjes van de gebruikte doekjes zodat de details kunnen worden ingevuld in het Tristel Quality Audit Trail Record Book.
- Gooi de doekjes en handschoenen weg in overeenstemming met de richtlijnen van het ziekenhuis.
- Alleen voor professioneel gebruik.

VOOR TRANSOESOPHAGALE  
ECHOCARDIOGRAFIE  
(TOE/TEE) PROBES



### STAP 1 : REINIGEN

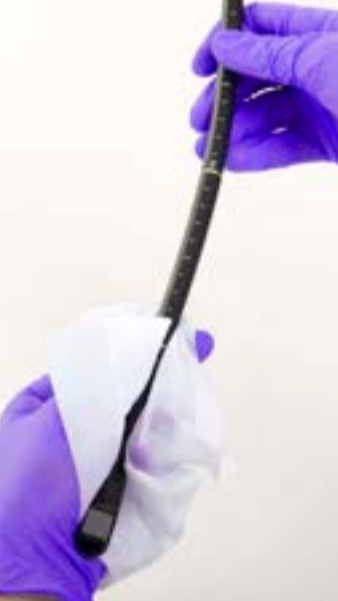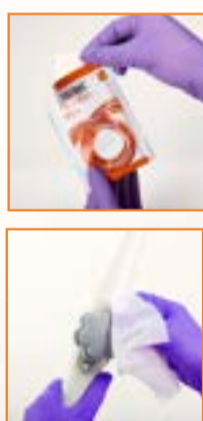

Neem het Reinigingsdoekje uit het zakje en vouw het uit in uw handpalm.

Veeg het medisch hulpmiddel schoon om al het zichtbare vuil te verwijderen.

Gooi het gebruikte doekje en de handschoenen weg als klinisch afval.

Ontsmet de handen en draag nieuwe handschoenen.

### STAP 2a + 2b : ACTIVEREN



Neem het Sporicide doekje uit het zakje en vouw het uit in uw handpalm.

Neem het Activatorschuim en breng twee doses aan op het sporicide doekje.

Vouw het doekje weer op en knijp het gedurende **15 seconden** zachtjes samen om het te activeren.

Zorg ervoor dat het doekje gelijkmatig bedekt is met schuim.

Gebruik het geactiveerde doekje onmiddellijk.

### STAP 2 : HIGH-LEVEL DESINFECTIE



Veeg in één beweging over het oppervlak van het medisch hulpmiddel om het met schuim te bedekken, en zorg ervoor dat het gehele oppervlak in contact komt met het doekje.

Gooi het gebruikte doekje weg overeenkomstig de lokale voorschriften.

Observeer een minimum contacttijd van **30 seconden**.

### STAP 3 : NASPOELEN



Neem het Spoeldoekje uit het zakje en vouw het uit in uw handpalm.

Gebruik het Spoeldoekje om het overtollig schuim te verwijderen van het medisch hulpmiddel.

Gooi het gebruikte doekje weg overeenkomstig de lokale voorschriften.

### STAP 4 : TRACEREN



Verwijs naar de gebruikte zakjes van de Tristel doekjes en het Activatorschuim om het Record Book in te vullen.