

SURFACES

High-level sporicide desinfectiemiddel
voor grote oppervlakken



Giet 5 liter leidingwater in een emmer of gelijkwaardig recipiënt.

Opmerking: geen warm water gebruiken.



Vouw het zakje dwars op de stippellijn en knijp stevig in één zijde tot de scheiding doorbroken is. De oplossing neemt een gele kleur aan.



Scheur het zakje aan de gekartelde zijde open of gebruik een schaar.



Giet de inhoud van het zakje in het water.



Breng het desinfectans aan met een vloerweil of met een microvezeldoek en laat drogen.



Respecteer een contacttijd van 5 minuten.

Opmerkingen:

- Maak de oplossing klaar in een goed geventileerde ruimte.
- Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Respecteer de instructies van het veiligheidsinformatieblad en het ziekenhuisprotocol.
- Bewaar in de originele verpakking, in een koele goed geventileerde ruimte, buiten het bereik van direct zonlicht.
- Eens samengevoegd, kan de oplossing 24 uur bewaard worden in een luchtdicht recipiënt.
- Gooi de lege verpakking weg, volgens de lokale richtlijnen.
- Vermijd contact met de huid en ogen. Contact met het desinfectiemiddel kan irritatie veroorzaken. Was, indien nodig, met veel water en zeep.
- Spoel het materiaal na gebruik met water.
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.
- Enkel voor professioneel gebruik.

De beschikbaarheid van producten is afhankelijk van goedkeuring door de regelgevende instanties in verschillende markten.