



SURFACE DISINFECTANT

EEN CHLOORDIOXIDE (ClO₂) SPORICIDE SCHUIM VOOR HET REINIGEN* EN DESINFECTEREN VAN HARDE, NIET-POREUZE OPPERVLAKKEN.

NIET GESCHIKT VOOR GEBRUIK OP ENDOSCOPEN OF CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN.

GEBRUIKSAANWIJZING



1

Monteer de JET-fles. Steek de blauwe buis in de blauwe fleshals en de rode buis in de rode fleshals. Bevestig de hendels aan elke kant van de trekkerkop om ze vast te zetten. JET is klaar voor gebruik.



2

Breng twee doses rechtstreeks op het oppervlak aan, of op een droog doekje, om een gebied van 50 cm x 20 cm (0,1 m²) te bedekken.



3

Veeg om het oppervlak nat te maken.



4

Zorg ervoor dat alle gebieden nat blijven gedurende de contacttijd van één minuut. Laat aan de lucht drogen.

TOEPASSINGEN

JET Surface Disinfectant is ontworpen voor de reiniging en high-level desinfectie van harde oppervlakken, zoals:

- Werkbladen
- Trolleys
- Bed- en matrasovertrekken (PVC)
- Instrumententafels
- Monitorbehuizingen
- Bedieningspanelen
- Toetsenborden

CONTROLES VOOR GEBRUIK

Enkele belangrijke geheugensteuntjes voor u begint:

- Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het productetiket en de productinformatie.
- Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
- Niet gebruiken als het product beschadigd is.
- JET Surface Disinfectant is alleen voor professioneel gebruik.
- Niet aanbrengen op oppervlakken van messing, koper, aluminium, zacht staal of zilver.

OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

JET Surface Disinfectant kan maximaal 2 jaar worden bewaard voordat het gebruikt wordt en moet op een koele, droge plaats, uit direct zonlicht, tussen 10°C - 35°C bewaard worden.

Eenmaal geopend heeft JET Surface Disinfectant een gebruiksduur van 6 maanden.

* Voor de bestrijding van schimmels dienen te behandelen oppervlakken voorafgaand aan desinfectie grondig gereinigd te worden met een daarvoor geschikt reinigingsmiddel. Naspoelen met schoon water en overtollig water verwijderen.

cache™

Sporicide
Oppervlakedesinfectie



Tristel Solutions Ltd

Unit 1b, Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK
T: +44 (0) 1638 721500 - E: mail@tristel.com - W: www.thecachecollection.com



Tristel NV, Smallandlaan 14B, 2660 Antwerp, Belgium
T: +32 3 889 26 40 - E: belgium@tristel.com