



KLAAR OM HET REINIGEND EN DESINFECTEREND MIDDEL JET TE GEBRUIKEN? HIER GAAN WE.

CONTROLES VOOR GEBRUIK

Enkele belangrijke aandachtspunten voordat u begint :

- ✓ Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
- ✓ Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
- ✓ Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- ✓ **JET** is uitsluitend bestemd voor gebruik door zorgprofessionals.
- ✓ Niet aanbrengen op oppervlakken uit messing, koper, aluminium, zacht staal of zilver.

GEBRUIKSAANWIJZING



Om **JET** te monteren, neemt u de spuitkop, schroeft u de doppen van de flessen los en plaatst vervolgens, volgens de markeringen **A rood** en **B blauw** op het etiket van de fles, de buisjes in de overeenkomstige openingen van de flessen.



Draai de vergrendelingen aan beide zijden van de spuitkop tegen de klok in om deze te vergrendelen. Controleer of de spuitkop uitgelijnd is met de bovenste markering op de kop van de verstuiver. **JET** is nu klaar voor gebruik.




Breng minstens 2 doses aan op één doekje.



Veeg het oppervlak schoon.



Zorg ervoor dat het oppervlak gedurende één minuut contacttijd nat blijft. Laat drogen aan de lucht.

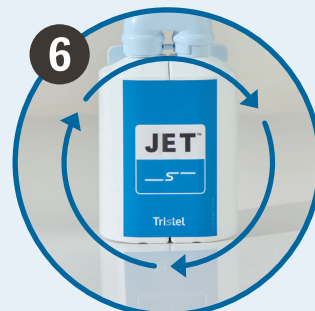

Indien recyclage niet mogelijk is, hergebruik het dan ! Raadpleeg de rubriek « BELANGRIJK » hieronder voor meer informatie.

BELANGRIJK

Uw **JET**-spuitkop moet worden hergebruikt met de tweede **JET**-fles. Om dit te doen, draait u de vergrendelingen met de klok mee los om de spuitkop te verwijderen. Voordat u de bovenstaande montage-instructies volgt, spoelt u de buisjes met stromend kraanwater en droogt u deze af met een papieren doek.

Na gebruik kunnen de lege **JET**-flessen en -doppen worden afgespoeld met kraanwater en vervolgens worden gerecycleerd.

BEWAARVOORSCHRIFTEN

JET is voor opening 2 jaar houdbaar en moet worden bewaard op een koele en droge plaats, beschermd tegen direct zonlicht, bij een temperatuur tussen 10 °C en 35 °C.



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gedetailleerde instructies.

Tristel™

België
Tristel NV, Smalandaan 14 B, 2660 Antwerpen
T +32 (0)3 889 26 40 E belgium@tristel.com
W www.tristel.com/be-nl/

Nederland
Tristel BV, Wattstraat 4, 4004 JS Tiel
T +31 (0)20 808 51 34 E nederland@tristel.com
W www.tristel.com/nl-nl/

Copyright © Tristel Solutions Limited
CCH-JET-169e-1
21/JUL/2026