

Tristel Fuse™

SURFACES

High-level sporicide desinfectiemiddel
voor grote oppervlakken



Vouw het zakje dubbel en knijp aan een kant zodat de inhoud door het middenschot van het zakje barst. De inhoud kleurt geel wanneer de werkzame stof, chloordioxide, wordt gevormd.



Wacht 5 minuten met het openen van het zakje.



Giet vervolgens de volledige inhoud van het zakje in 5 liter water.



De te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen. Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.



Tristel Fuse for Surfaces wordt direct op het oppervlak aangebracht met een doek of mop. Gebruik voldoende gebruiksooplossing zodat de oppervlakken nat blijven gedurende de gehele inwerktijd.



Respecteer een contacttijd van 5 minuten.

Opmerkingen:

- Maak de oplossing klaar in een goed geventileerde ruimte.
- Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Respecteer de instructies van het veiligheidsinformatieblad en het ziekenhuisprotocol.
- Bewaar in de originele verpakking, in een koele goed geventileerde ruimte, buiten het bereik van direct zonlicht.
- Eens samengevoegd, kan de oplossing 24 uur bewaard worden in een luchtdicht recipiënt.
- Gooi de lege verpakking weg, volgens de lokale richtlijnen.
- Vermijd contact met de huid en ogen. Contact met het desinfectiemiddel kan irritatie veroorzaken. Was, indien nodig, met veel water en zeep.
- Niet gebruiken op oppervlakken van messing, koper, aluminium, zacht staal of zilver.
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.
- Enkel voor professioneel gebruik.

Het product kan alleen worden gebruikt voor het desinfecteren van oppervlakken en materialen die gedurende de contacttijd (5 minuten) na het aanbrengen niet in contact komen met patiënten of medisch personeel.

Tristel™

Geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk:
Tristel Solutions Limited, Unit 1b, Lynx Business Park,
Fordham Road, Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Nederland: Tristel B.V., Binderij 7 R, 1185 ZH Amstelveen,
Nederland - T 020 808 51 34 - E nederland@tristel.com

EC REP Tristel NV, Smalandaan 14B, 2660 Antwerpen, België
T: +32 3 889 26 40 - E belgium@tristel.com

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Wal-562-v5
28/MAY/2024