

Tristel Trio™

Wipes System

De complete oplossing voor een high-level desinfectie van invasieve medische hulpmiddelen zonder werkkanaal



Raadpleeg de gebruikershandleiding voor volledige instructies.

Opmerkingen:

- Volg altijd de ziekenhuisprotocollen en de instructies van de fabrikant op.
- Ontsmet handen en draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het omgaan met desinfecterende middelen en medische hulpmiddelen.
- Een eerste voorreiniging moet onmiddellijk na gebruik van het medisch hulpmiddel in overeenstemming met het ziekenhuisprotocol worden uitgevoerd.
- Zorg ervoor dat u het instrument niet schaaft of plooit en let in het bijzonder op randen, ribbels en inkepingen.
- Bereid het ontsmettingsproces voor, door elk van de doekjes en het Activatorschuim uit de doos te nemen.
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is en/of als de doekjes droog zijn.
- Gebruik, wanneer nodig, meer doekjes om zeker te zijn dat het instrument zichtbaar schoon is.
- Bewaar de zakjes van de gebruikte doekjes zodat de details kunnen worden ingevuld in het Tristel Quality Audit Trail Record Book.
- Gooi de doekjes en handschoenen weg in overeenstemming met de richtlijnen van het ziekenhuis.
- Alleen voor professioneel gebruik.

VOOR MANOMETRIE
KATHETERS

STAP 1 : REINIGEN



Neem het Reinigingsdoekje uit het zakje en vouw het uit in uw handpalm.

Veeg het instrument schoon om al het zichtbare vuil te verwijderen.

Gooi het gebruikte doekje en de handschoenen weg als klinisch afval.

Ontsmet de handen en draag nieuwe handschoenen.

STAP 2a + 2b : ACTIVEREN




Neem het Sporicide doekje uit het zakje en vouw het uit in uw handpalm.

Neem het Activatorschuim en breng twee doses aan op het doekje.

Verfrommel het doekje gedurende **15 seconden** om chloordioxide te genereren.

Het gehele doekje dient met schuim bedekt te zijn.

STAP 2 : HIGH-LEVEL DESINFECTIE

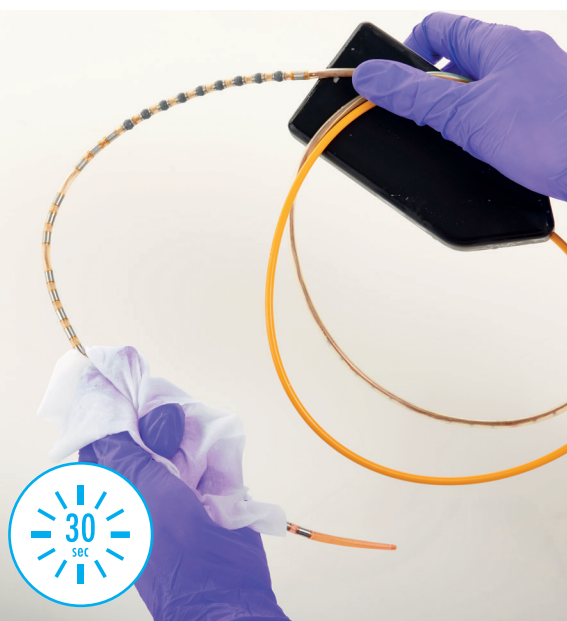

Ontsmet het instrument zodat alle oppervlakken bedekt zijn met schuim.

Gebruik, indien nodig, een wattenstaafje om het schuim in de inkepingen aan te brengen.

Gooi het gebruikte doekje en de handschoenen weg als klinisch afval.

Observeer een minimum contacttijd van **30 seconden**.

STAP 3 : NASPOELEN



Neem het Spoeldoekje uit het zakje en vouw het uit in uw handpalm.

Gebruik dit Spoeldoekje om het overtollig schuim te verwijderen van het instrument.

Gooi het gebruikte doekje en de handschoenen weg als klinisch afval.

STAP 4 : TRACEREN



Verwijs naar de gebruikte zakjes van de Tristel doekjes en het Activatorschuim om het Record Book in te vullen.

Tristel™

Geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Voor informatie over de octrooien: <http://www.our-patents.info/tristel>

België: Tristel NV, Smalldlaan 14 B, 2660 Antwerpen, België
T +32 (0)3 889 26 40 - E belgium@tristel.com

Nederland: Tristel B.V., Binderij 7 R, 1185 ZH Amstelveen, Nederland
T 020 808 51 34 - E nederland@tristel.com

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Wal-445-1
February 2019